

MEDING Gesichtsschild



MEDING GMBH

Anwendungsgebiet

Gesichtsschild mit austauschbarer Visierscheibe. Weiche selbstklebende Schaumstoffpads für guten Tragekomfort. Größe einstellbar auf verschiedene Kopfgrößen. Leicht und bequem. Das aus Kunststoff gefertigte Gesichtsschild dient als Schutz in allen Bereichen des öffentlichen Lebens gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten.

ACHTUNG:

- Kein Schutz gegen brennende, sich zersetzende oder durch chemische Wirkung auflösende Stoffe wie Säuren, Lichtquellen, Gase oder Dünste jeglicher Art!
- Nicht beim Rauchen oder während jeglicher Tätigkeiten mit oder in der Nähe von Flammen oder wärmespendenden Geräten einsetzen!
- Kein Schutz gegen mechanische Einwirkung!
- Kein Schutz gegen Funken, Bestrahlung oder ultraviolette Strahlen!

Montageanleitung


1. Lieferumfang
 - a) transparente Visierscheibe (1x)
 - b) Stirnhalter (1x)
 - c) Stabilisator (1x)
 - d) Schaumstoffklebepads (3x)
 - e) justierbares Kopfband (1x)



2. An der Oberkante der Visierscheibe sind 4 Löcher eingestanzt. Nehmen Sie die Visierscheibe und hängen Sie die Löcher, beginnend an einer Seite des Stirnhalters, nacheinander in die Haken ein. Um das letzte Loch einzurasten, drücken Sie das Ende des Stirnhalters nach vorne in Richtung der Visierscheibe.



3. Schieben Sie nun den Stabilisator beginnend an einer Seite des Stabilisators an der Unterkante der Scheibe mittig über die 3 Löcher (dazu muss die Scheibe leicht in die Rundung gebogen werden). In der korrekten Position rastet der Stabilisator in den Löchern leicht ein.

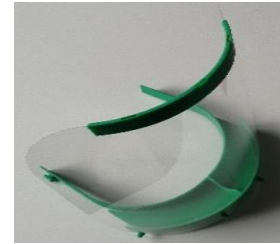

4. Die selbstklebenden Schaumstoffpads bringen Sie an der Innenseite des Stirnhalters in der für Sie angenehmen Position an.
5. Das Kopfband wird entsprechend Ihrer Kopfgröße zuletzt links und rechts am Ende des Stirnhalters eingehängt, so dass das Gesichtsschild bequem sitzt und beim Tragen nicht verrutscht und nicht drückt.



6. Die Visierscheibe ist beständig gegen handelsübliche Desinfektionsmittel und Glasreiniger. Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein weiches Tuch, so dass die Scheibe nicht verkratzt.
7. Ersatz-Visierscheiben sind als Zubehör separat erhältlich.

REF 8121



Meding GmbH, Kruppstr. 8, 58553 Halver - www.meding.com